


**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Борисоглебского городского округа
«Детская школа искусств №2»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

 О.В. Попова

«01» сентября 2020 г.

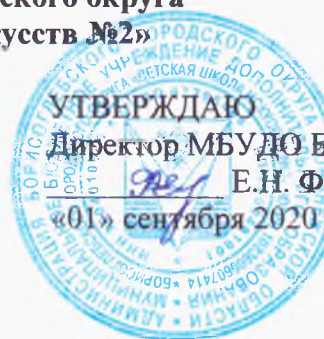

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО БГО «ДШИ №2»

 Е.Н. Феклисова

«01» сентября 2020 г.

Инструкция по применению приборов по обеззараживанию воздуха

Рециркулятор—это прибор для обеззараживания воздуха помещений с помощью ультрафиолетового бактерицидного излучения в процессе принудительной циркуляции воздушного потока через корпус, внутри которого расположены бактерицидные лампы низкого давления.

Достоинства рециркулятора:

- 1.Отсутствие зона И УФ излучения во внешнем пространстве позволяет эксплуатировать прибор в присутствии людей.
- 2.Специальные малошумные вентиляторы с большой производительностью не создают дискомфорта для людей, находящихся в помещении.
- 3.Большая производительность при малом потреблении электроэнергии.

Режимы обеззараживания воздуха:

- по 25 минут, с интервалом 2,5 часа (в небольших помещениях);
- по 35-45 минут (в помещениях с большей площадью).